

## Produktbeschreibung

Instru Plus ist ein flüssiges, aldehydhaltiges Instrumentendesinfektionsmittel in konzentrierter Form.

## Anwendungsgebiet

Für alle Bereiche geeignet, in denen ärztliches Instrumentarium im Einlegeverfahren aufbereitet wird. Als high-level Desinfektionsmittel dient es im Rahmen der Abschlussdesinfektion der manuellen Aufbereitung von sämtlichen thermostabilen und thermolabilen Instrumenten, wie starre und flexible Endoskope, endoskopische Zusatzinstrumente und Anästhesiezubehör im Einlegeverfahren.



## Wirkpektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- fungizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)
- viruzid

## Anwendungshinweise

Instru Plus liegt als Konzentrat zum Herstellen einer Gebrauchslösung vor. Die empfohlene Anwendungskonzentration liegt bei 3-5%. Instrumente nach erfolgter Reinigung einlegen. Sämtliche Oberflächen und Hohlräume müssen bedeckt bzw. gefüllt sein. Die Anwendungskonzentration und Einwirkzeiten sind zu beachten. Instrumente entnehmen, gründlich mit Wasser (Trinkwasserqualität) abspülen und trocknen. Für semikritische Medizinprodukte, die nicht sterilisiert werden, ist zur Schlusspülung keimfreies, vorzugsweise steriles Wasser zu verwenden. Beachten Sie die Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (in Deutschland: RKI, KRINKO, MPBetreibV). Beachten Sie die Hinweise der Instrumenten- und Gerätehersteller. Instru Plus ist mit aminhaltigen Desinfektionsmitteln nicht kompatibel. Bei Ersteinsatz und bei Produktwechsel sind die Instrumente, das Zubehör, die Wannen und die Aufbereitungsgeräte sowie die Applikationshilfen gründlich zu reinigen und zu spülen. Das Produkt kann zum Ende der Haltbarkeit an Farbintensität verlieren. Nur für den professionellen Gebrauch.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnr. | Gebindegr. | Gebindeart | Verpackungseinh. | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|------------|------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 601397     | 2 L        | Kanister   | 6 x 2 L          | 18313308    | 4260181253916    | 4260181254494                 |
| 601327     | 5 L        | Kanister   | 2 x 5 L          | 18313283    | 4260181253909    | 4260181254487                 |

# Instru Plus

Produktinformation

## Medizinproduktklasse

IIb

## Zusammensetzung

**In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:**

15 g (Ethylendioxy)dimethanol

4,8 g Glutaral

0,996 g Formaldehyd

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung  
sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand  
an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es  
gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Instru Plus                                                                               | Belastung |         | Norm      | Konzentration | Einwirkz.          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------------|--------------------|
|                                                                                           | hoch      | niedrig |           |               |                    |
| Bakterizid                                                                                | x         |         | EN 13727  | 3 %<br>2 %    | 5 Min.<br>15 Min.  |
| Levurozid                                                                                 |           |         | EN 14561  |               |                    |
|                                                                                           | x         |         | EN 13624  | 4 %           | 30 Min.            |
| Fungizid<br>(C. albicans,<br>A. brasiliensis)                                             |           |         | EN 14562  |               |                    |
|                                                                                           | x         |         | EN 13624  | 4 %           | 30 Min.            |
| Tuberkulozid<br>(M. terrae)                                                               |           |         | EN 14562  |               |                    |
|                                                                                           |           | x       | EN 14348  | 4 %           | 30 Min.<br>60 Min. |
|                                                                                           |           |         | EN 14563  | 3 %           |                    |
| Mykobakterizid<br>(M. terrae, M. avium)                                                   |           | x       | EN 14348  | 5 %           | 30 Min.<br>60 Min. |
|                                                                                           |           |         | EN 14563  | 3 %           |                    |
| Begrenzt viruzid<br>nach DVV/RKI<br>(Vaccinia Stamm<br>Elstree, BVDV)                     | 10% FKS   |         | DVV / RKI | 1 %           | 5 Min.             |
| Begrenzt viruzid<br>PLUS<br>(Adenovirus Typ 5,<br>Murines Norovirus)                      | x         |         | EN 17111  | 4 %           | 15 Min.            |
|                                                                                           | 10% FKS   |         | DVV / RKI | 4 %           | 15 Min.            |
| Viruzid<br>(Adenovirus Typ 5,<br>Murines Norovirus,<br>Poliovirus Typ 1,<br>Polyoma SV40) | x         |         | EN 17111  | 4 %           |                    |

## Informationen zu diesem Produkt



Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage  
[www.drdeppe.de](http://www.drdeppe.de)

Spezielle Anfragen richten Sie bitte an  
[info@drdeppe.de](mailto:info@drdeppe.de)

CE 0044



**Laboratorium Dr. Deppe GmbH**  
Hooghe Weg 35 · 47906 Kempen  
T +49 (0) 2152 5565-0 W [www.drdeppe.de](http://www.drdeppe.de)